



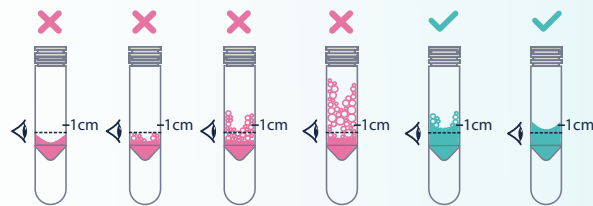

Instruktioner för insamling av salivprov

30 minuter före provinsamling

- Tvätta händerna
- Använd inte om du är sjuk (infektion)
- Ät eller drick inte
- Rök eller snusa inte
- Tugga inte tuggummi
- Bär inte läpstift
- Borsta inte tänderna

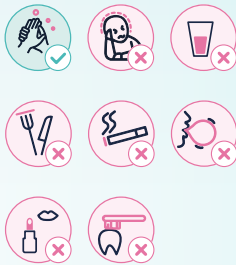

Mängden saliv måste vara tillräcklig.



1. Spotta i tratten tills mängden saliv (utan bubblor) når 1 cm över påfyllnadslinjen.



2. Stäng röret ordentligt genom att trycka hårt på trattlocket tills du hör ett tydligt klick.



3. Skruva loss tratten från röret.



4. Stäng röret med skruvlocket.



5. Skaka röret i 5 sekunder.

Lider du av endometrios?

Ett salivtest kan ge dig svar.

För mer information,
besök endotest.se

Life Genomics
Odinsgatan 28
411 03 Göteborg

info@lifegenomics.se
031-749 36 50



- 1-Zondervan KT et al. Nat Rev Dis Primers 2018;4
- 2-International working group of AAGL ESGE ESHRE and WES, et al., 2021.
- 3-<https://eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Endometriosis-guideline.aspx>
- 4-Machine learning algorithms as new screening approach for patients with endometriosis. Bendifallah S & al. Sci Rep. 2022 Jan 12;12(1):639. doi: 10.1038/ s41598-021-04637-2. https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8755739/pdf/41598_2021_Article_4637.pdf
- 5-Clues for Improving the Pathophysiology Knowledge for Endometriosis Using Serum Micro-RNA Expression. Dabi Y & al. Diagnostics (Basel). 2022 Jan 12;12(1):175. doi: 10.3390/diagnostics12010175. <https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC8774370/pdf/diagnostics-12-00175.pdf>
- 6-Salivary MicroRNA Signature for Diagnosis of Endometriosis. Bendifallah & al. J Clin Med. 2022 Jan 26;11(3):612. doi: 10.3390/jcm11030612. <https://ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC8836532/pdf/jcm-11-00612.pdf>
- 7-MicroRNome analysis generates a blood-based signature for endometriosis. Bendifallah S & al. Sci Rep. 2022 Mar 8;12(1):4051. doi: 10.1038/s41598-022-07771 https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8902281/pdf/41598_2022_Article_7771.pdf
- 8-Endometriosis Associated-miRNome Analysis of Blood Samples:A Prospective Study Bendifallah S & al. Diagnostics. 2022; 12(5):1150. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12051150>



Ett salivtest för tidig och tillförlitlig
diagnos av endometrios

Vad är endometrios?

Endometrios drabbar cirka 10% av kvinnor i fertil ålder. Det kan drabba alla kvinnor och debutera från tidiga tonåren.

Endometrios kännetecknas av endometrieliknande vävnad utanför livmodern, så kallade endometrios lesioner. Tillväxten av dessa lesioner är ofta förknippad med en inflammatorisk process². Under menstruation kan endometrios lesioner reagera på variationer i hormonnivåer, vilket leder till akut inflammation, blödning, svår smärta, och många andra symtom.

Ziwig Endotest® rekommenderas för kvinnor mellan 18 och 43 års ålder som uppvisar symtom som tyder på endometrios³:

- Kronisk bäckensmärta
- +/- dysmenorré/smärta vid menstruation
- +/- djup dyspareuni/smärta vid samlag
- +/- dysuri/smärta vid urinering
- +/- dyschezi/smärta vid avföring
- +/- smärtsam rektal blödning
- +/- haematuri (blod i urinen) under menstruation
- +/- smärta i axelspetsen
- +/- infertilitet

Endometrios kan även vara helt asymtomatisk, och diagnostiseras ibland under infertilitetsutredningar. Faktum är att en betydande andel av patienter med endometrios lider av infertilitet.

Ziwig Endotest® är en CE-märkt in vitro medicinsk produkt. Ziwig Endotest® är inte avsedd att ersätta bildiagnostik av bäcken. Bildiagnostik förblir väsentlig efter diagnos för lesionsbeskrivning, kartläggning och klassificering.

Vad är Ziwig Endotest®?

Ett team bestående av expertläkare specialiserade på endometrios, ingenjörer inom artificiell intelligens, och medicinska forskare från Ziwig, har utvecklat ett salivbaserat diagnostiskt test som använder nästa generations sekvensering av mikroRNA.

Varför ta testet?

Detta enkla och icke-invasiva test möjliggör tidig diagnos av alla typer av endometrios. Tidig diagnos möjliggör riktad vård som kan sakta ned försämringen av smärta och andra symtom.

Fördelarna med Ziwig Endotest®

- Tydliga positiva/negativa resultat
- Snabb diagnos
- Alla grader av endometrios kan diagnostiseras⁴⁻⁸
- Hög tillförlitlighet
- Enkel och icke-invasiv provinsamling



Hur tar jag testet?

Ziwig Endotest® är ett salivtest som ordineras av vårdpersonal.

För mer information om hur du tar testet, besök:

endotest.se

